



Divisão

# Biotecnologia

Ciência em Benefício da Vida

IDENTIFICAÇÃO (ANILHA, CHIP, GAJOLA, NOME) **PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**

ESPÉCIE (NOME CIENTIFICO OU COMUM) **PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**

NOME OU APELIDO (OPCIONAL)

FILIAÇÃO (OPCIONAL) PAI \_\_\_\_\_ NASCIMENTO (OPCIONAL) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

MÃE \_\_\_\_\_

EMPRESA OU PROPRIETÁRIO \_\_\_\_\_

**PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**

Eu, \_\_\_\_\_  
declaro que coletei e identifiquei corretamente esta amostra

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
data assinatura

TIPO DE EXAME

Sexagem

Genotipagem

Sanidade



MANTENHA EM LOCAL SECO, FRESCO E AO ABRIGO DA LUZ

## KIT DE COLETA

Rua Conselheiro Tobias, 57, Zona 04  
CEP 87014-270 - Maringá - Paraná  
Fone: 44 3029 9660 | 8836 6978  
www.scbiotec.com.br  
atendimento@scbiotec.com.br


cod. 2807/06.2016

AMOSTRA COLETADA

Pena

Sangue

Casca de Ovo

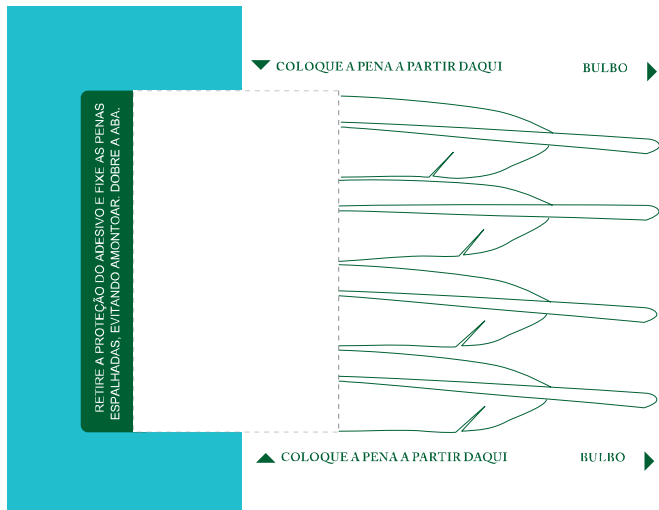

**PRESEERVE O BULBO DA PENNA. EVITE TOCAR O COLAR NO ADESIVO, POIS É NELE QUE ESTÁ O DNA.**

### INSTRUÇÕES PARA COLETA DE PENNAS

- Colete ao menos 8 penas preferencialmente do peito da ave;
- Em seguida, fixe as penas no adesivo e lacre o kit;
- Quando fixar as penas procure espalhá-las o máximo possível, evitando que fiquem amontoadas e com o bulbo em contato com o adesivo (igual ao desenho).

### RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

- Preencha corretamente todos os dados obrigatórios no kit. Caso contrário, as amostras poderão sofrer atraso de processamento no laboratório;
- Lave bem as mãos antes de coletar;
- Não tocar os bulbos ou sangue após a coleta a fim de evitar a contaminação do DNA;
- Envie os kits em no máximo 5 dias após a coleta;
- Em caso de dúvidas, entre em contato conosco antes de fazer a coleta;
- Se o material coletado não apresentar qualidade ou a quantidade de DNA suficiente para a realização do exame, será solicitado nova coleta sem custo adicional para o cliente.

MANTENHA O KIT EM LOCAL SECO, FRESCO E AO ABRIGO DA LUZ

### INSTRUÇÕES PARA COLETA DE SANGUE:

- Corte um pedacinho da unha do pássaro;
- Espere alguns segundos até aparecer o sangue;
- Pingue 2 ou mais gotas no local indicado;
- Espere o sangue secar completamente (15 a 30 min) antes de fechar o kit.