

Divisão

Biotechnologia

Ciência em Benefício da Vida


KIT DE COLETA

DNA

Rua Conselheiro Tobias, 57, Zona 04 - CEP 87014-270 - Maringá - Paraná
Fone: 44 3029 9660 | 98836 6978
www.scbiotech.com.br
atendimento@scbiotech.com.br

CSL 28/06/09 2016

Cartão-coleta amostra DNA

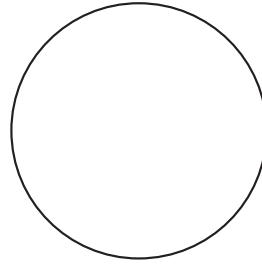

Cartão-coleta amostra DNA

PARA PROPÓSITOS CLÍNICOS E EDUCACIONAIS
ENVOLVENDO PESQUISA DE DNA

Recomendações importantes:

- Evite tocar na área do cartão de coleta de DNA destinada à amostra.
- O cartão-coleta de DNA precisa ser secado ao ar antes de ser colocado no envelope.
- A secagem ao ar deverá ser por pelo menos 45 min à sombra.
- Não seque diretamente em qualquer fonte de calor, inclusive luz do sol.
- Não coloque perto de microondas ou fonte de luz UV.
- Não permita que duas superfícies úmidas de amostras diferentes se toquem.
- Envie o cartão-coleta de DNA no envelope para evitar contaminação.
- Envie imediatamente o kit acompanhado do FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES EM AVES.

IDENTIFICAÇÃO (ANILHA, CHIP, GAIOLA, NOME) **PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO**

ESPÉCIE (NOME CIENTÍFICO OU COMUM)

DATA DA COLETA

HORÁRIO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

Eu, _____
declaro que coletei e identifiquei corretamente esta amostra

data

assinatura

Favor preencher o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES EM AVES.